

# So inhalieren Sie mit dem **PARI LC SPRINT®** Vernebler



**1**  
Vor jeder Inhalation gründlich die Hände waschen.



**2a**  
Mundstück oder Maske an den Vernebler stecken.



**2b**  
Bei Verwendung einer BABY Maske den BABY Winkel verwenden.  
Maskenposition entsprechend der Lage des Babys ausrichten.



**3**  
Vernebler und Kompressor mit Anschlussschlauch verbinden.  
Kompressor an Stromnetz anschließen.



**4**  
Verschlussdeckel öffnen, Inhalationslösung einfüllen, Deckel schließen.



**5a**  
Aufrecht und entspannt hinsetzen.  
Gerät einschalten.  
Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit den Lippen umschließen.



**5b**  
Bei Verwendung einer Maske: Vernebler in senkrechter Position halten.  
Maske muss dicht auf dem Gesicht aufliegen.



**6**  
Langsam und tief einatmen.  
Bei zu schnellem Einatmen erzeugt das integrierte PIF-Control System einen Widerstand. Sobald man diesen wahrnimmt, langsamer einatmen.  
Das Medikament ist aufgebraucht, wenn am Vernebler ein verändertes Geräusch hörbar ist.



**7**  
Gerät ausschalten.  
Vernebler vom Schlauch abziehen.  
Zum Trocknen des Schlauchs Gerät wieder einschalten.  
Zur vollständigen Trennung vom Netz: Netzstecker ziehen.

# Hygiene und Wartung PARI LC SPRINT® Vernebler



## Reinigung

... nach jeder Anwendung.

Vernebler in Einzelteile zerlegen und unter fließendem Trinkwasser vorspülen. Einzelteile in warmen Trinkwasser mit Spülmittel reinigen (Einwirkzeit: mind. 5 Min.), danach gründlich unter fließendem Trinkwasser nachspülen.



## Desinfektion

... einmal wöchentlich.

In einer ausreichenden Menge in einer handelsüblichen Menge in einem handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät (z. B. für Babyflaschen) mind. 5 Min.)

### oder

in einem handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät (z. B. für Babyflaschen) mind. 6 Min.



3

## Trocknung

Einzelteile nach jeder Reinigung und/oder Desinfektion auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage legen.



4

## Aufbewahrung

Teile an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.



5


## Wartung: mind. 1x pro Jahr

Vernebler, Anschluss Schlauch und Luftfilter wechseln (PARI Year Packs). Bei Beschädigung oder Verschmutzung, die sich nicht reinigen lässt, gegebenenfalls früher erneuern.

Ein Video zur Handhabung und Reinigung finden Sie auf [www.pari.com](http://www.pari.com).



**Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung des Verneblers und des Kompressors.** Sie liegt den Geräten bei und enthält eine detaillierte Beschreibung. Bei Verlust können Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung unter [www.pari.com](http://www.pari.com) aufrufen oder unter +49 (0) 8151 279 279 anfordern.

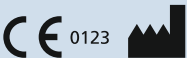

PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation

Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY, Tel: +49 (0) 8151 279 0, E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de), [www.pari.com](http://www.pari.com)

