

Die Inhalationslösungen von PARI

Zusätzlich zur Medikamentenanwendung bietet sich die Inhalation vernebelter Salzlösungen an, die die Atemwege befeuchten, schützen oder schleimlösend wirken. Sterile Kunststoffampullen ermöglichen die leichte Entnahme und sichere Dosierung der PARI Inhalationslösungen.



PARI NaCl 0,9 %
Inhalationslösung

PARI Protect®
Inhalationslösung mit Ectoin Isoton (1,3 % Ectoin, Meersalz, Wasser)

Mucoclear Protect®
Inhalationslösung mit Ectoin Hyperton (NaCl 3 %)

z. B. bei Erkältungskrankheiten oder als Trägerlösung

z. B. bei Erkältungssymptomen, trockenem Husten, Heuschnupfen und allergischem Asthma

z. B. bei Bronchitis, akuter Bronchiolitis, Asthma und COPD

befeuchtet die Atemwege

befeuchtet, schützt und beruhigt die Atemwege

löst den Schleim, schützt die Schleimhaut, bekämpft die Entzündung

erstattungsfähig als Trägerlösung für jedes Alter (in Deutschland, AMR Anlage V)

erste Inhalationslösung mit natürlichem Ectoin

für Säuglinge, Kinder und Erwachsene

steril und ohne Konservierungsmittel

20 x 2,5 ml; PZN: 03109789

10 x 2,5 ml; PZN: 12420440

10 x 5 ml; PZN: 16804114

60 x 2,5 ml; PZN: 00607423

20 x 2,5 ml; PZN: 12359982

20 x 5 ml; PZN: 16804120


120 x 2,5 ml; PZN: 03450382

60 x 2,5 ml; PZN: 12359999

60 x 5 ml; PZN: 16804137

10 x 5 ml; PZN: 12474217

20 x 5 ml; PZN: 12474223

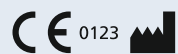

PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
E-Mail: info@pari.de
Tel.: +49 (0)8151 279 0
www.pari.com



PARI Service Center
+49 (0)8151 279 279
Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns an.
Wir sind gerne für Sie da.

15200018-B-2023-08



Inhalation mit meinem

PARI COMPACT2. Wie geht das?

Ratschläge und Tipps für die Inhalation.

www.pari.com

So inhalieren Sie mit dem PARI COMPACT2



1 Vor jeder Inhalation gründlich die Hände waschen.



2 Mundstück oder Maske an den Vernebler stecken.



3 Vernebler und Kompressor mit Anschlusschlauch verbinden. Kompressor an Stromnetz anschließen.



4 Verschlussdeckel öffnen, Inhalationslösung einfüllen, Deckel schließen.



5a Aufrecht und entspannt hinsetzen. Gerät einschalten. Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit den Lippen umschließen.



5b Bei Verwendung einer Maske: Vernebler in senkrechter Position halten. Maske muss dicht auf dem Gesicht aufliegen.



6 Langsam und tief einatmen, entspannt ausatmen. Das Medikament ist aufgebraucht, wenn am Vernebler ein verändertes Geräusch hörbar ist.



7 Gerät ausschalten. Vernebler in die Halterung am Kompressor stecken.



8 Zur vollständigen Trennung vom Netz Netzstecker ziehen.

Gute Pflege lohnt sich!

PARI verlängert die Garantie Ihres kompressorbetriebenen Inhalationsgeräts um ein weiteres Jahr, wenn Sie es einmal jährlich im Fachhandel (Apothek / med.-techn. Fachhandel) überprüfen lassen. Bei teilnehmenden Fachhändlern* ist die Überprüfung kostenlos. Nutzen Sie dazu Ihren persönlichen PARI Gerätepass. Fordern Sie Ihr individuelles Exemplar bis spätestens 12 Monate nach Kaufdatum Ihres Inhalationsgeräts beim teilnehmenden Fachhandel an.

*Nähere Informationen zu teilnehmenden Fachhändlern (Apothek / med.-techn. Fachhandel), die kompressorbetriebene Inhalationsgeräte von PARI im Rahmen der Garantiezeitverlängerung kostenlos überprüfen, erhalten Sie im PARI Service Center unter +49 (0) 8151 279 279.

1 Jahr

kostenlose Garantiezeitverlängerung für Ihren PARI COMPACT2

Hygiene & Wartung PARI LC SPRINT® COMPACT Vernebler



Reinigung

... nach jeder Anwendung. Vernebler in Einzelteile zerlegen und unter fließendem Trinkwasser vorspülen. Einzelteile in warmen Trinkwasser mit Spülmittel reinigen (Einwirkzeit: mind. 5 Min.), danach gründlich unter fließendem Trinkwasser nachspülen.



Desinfektion

... einmal wöchentlich. In einer ausreichenden Menge kochendem Wasser (mind. 5 Min.)

oder

in einem handelsüblichen thermischen Desinfektionsgerät (z. B. für Babyflaschen) mind. 6 Min.




Trocknung

Einzelteile nach jeder Reinigung und/oder Desinfektion auf eine trockene, saubere und saugfähige Unterlage legen.



Aufbewahrung

Teile an einem trockenen, staubfreien Ort aufbewahren.

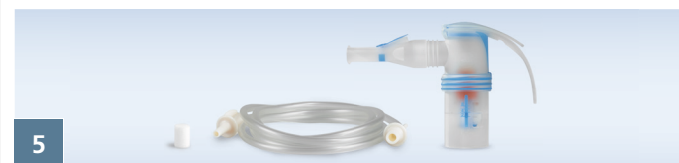

Wartung: mind. 1x pro Jahr

Vernebler, Anschlusschlauch und Luftfilter wechseln (PARI Year Packs). Bei Beschädigung oder Verschmutzung, die sich nicht reinigen lässt, gegebenenfalls früher erneuern.



Anwender-Video
www.pari.com oder diesen QR-Code scannen

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung des Verneblers und des Kompressors. Sie liegt den Geräten bei und enthält eine detaillierte Beschreibung. Bei Verlust können Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung unter www.pari.com aufrufen oder unter +49 (0) 8151 279 279 anfordern.

Wir empfehlen, den Vernebler einmal im Jahr durch ein PARI Year Pack zu tauschen.

Zur Erinnerung tragen Sie auf der Plakette das Datum (Monat und Jahr) für den nächsten Austausch ein und kleben sie dann auf Ihren PARI Kompressor.

Informationen zu den PARI Year Packs erhalten Sie auf **www.pari.com/year-packs** oder im Fachhandel.

Jedes Familienmitglied sollte aus hygienischen Gründen sein eigenes PARI Year Pack benutzen. Diese können vom Arzt verordnet werden!

Nächster Austauschtermin:



Achtung: den Aufkleber auf keinen Fall über die Lüftungsschlitze des Kompressors kleben!