



VORTEX®

وضع. زفير. شهيق.

دليل مختصر



www.pari.com

05 100079-8-2024-08

أداة المساعدة العملية بيد واحدة - لأن الوالدين لا يملكان سوى يدين اثنتين

مثالية - VORTEX®
للأطفال من جميع الأعمار

VORTEX
مع قناع الرضع
وأداة المساعدة
بيد واحدة



VORTEX
مع قناع الأطفال



VORTEX
مع قطعة الفم



أقنعة الأطفال والرضع VORTEX® -
مزيداً من الراحة والفعالية

خال من
البيستينول



- راحة كبيرة في الارتداء - لتحقيق مستوى عالٍ من التقبل والاستخدام بدون حدوث توتر للأطفال والوالدين
- استنشاق فعال - تُخلق حافة القناع الرقيق بإحكام مع توفر ضغط اتصال منخفض
- نظافة صحية في منتهي السهولة - قابلة للغلي والتعقيم وأمنة للاستخدام في غسالة الأطباق.



PARI GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY

البريد الإلكتروني: info@pari.de، الهاتف: +49 (0) 8151 279 0، www.pari.com

أداة المساعدة العملية بيد واحدة - لأن الوالدين لا يملكان سوى يدين اثنتين



تتيح أداة المساعدة الحاصلة على براءة اختراع إمكانية استخدام VORTEX بيد واحدة وإطلاق البخاخ الفموي. وعلى هذا النحو يمكنكم الحفاظ على سلامة طفلكم أثناء عملية الاستنشاق - من أجل نجاح العلاج عند استنشاق الأطفال.

استخدام VORTEX
موضح في فيديو مُبسّط



التعقيم

التنظيف



فك
VORTEX



يتم الغلي للتعقيم،
5 دقائق



يتم التنظيف بالماء الدافئ باستخدام
منظف، ويُغسل بالماء التنظيف



تترك لتجف



أو بدلاً من ذلك:

يتم التعقيم في
مبخر زجاجات الأطفال

توضع في غسالة الأطباق، يتم اختيار برنامج
بدرجة حرارة 50°م على الأقل

... أقنعة الرضع وأداة المساعدة بيد واحدة



يتم تحريك أداة المساعدة بيد واحدة
فوق الحيز الاسطواني



يُزال غطاء الرذاذ، ويتم الرج بقوة



يُزال الغطاء ويوضع القناع



يتم إدخال الرذاذ في حلقة التوصيل
وضغط أداة المساعدة بيد واحدة



يتم إطلاق الرذاذ، يتم أخذ شهيق
وزفير بعمق وببطء



يوضع القناع بإحكام على الفم والأنف


في حالة رشات الرذاذ المتعددة في الاستخدام الواحد:
تكرر الخطوة 6

18-0 شهرًا: 4-6 أنفاس، < 18 شهرًا: 2-4 أنفاس

الأمر بسيط للغاية: التركيب والاستنشاق بواسطة... ... قطعة الفم



يوضع الرذاذ في الجزء الخلفي من
VORTEX

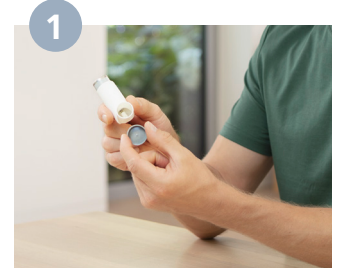

يُزال غطاء الرذاذ، ويتم الرج بقوة



تؤخذ قطعة الفم بين الأسنان
ويتم إحاطتها بالشفيتين



يُزال غطاء VORTEX



يتم أخذ شهيق وزفير بعمق
وببطء



يُطلق الرذاذ

في حالة رشات الرذاذ المتعددة في الاستخدام الواحد:
تكرر الخطوتان 5 و6

18-0 شهرًا: 4-6 أنفاس، < 18 شهرًا: 2-4 أنفاس