

Die praktische Einhand-Bedienhilfe – für eine einfache und flexible Anwendung



Die patentierte Einhand-Bedienhilfe ermöglicht es, die VORTEX mit einer Hand anzuwenden und das Dosieraerosol auszulösen. Dadurch unterstützt sie Patienten mit geringer Fingerkraft oder eingeschränkter Koordinationsfähigkeit.

Anwendung der VORTEX® im Video einfach erklärt



www.pari.com/inhalierhilfe-vortex



Die richtige Ausstattung für jeden Patienten

Dank des abnehmbaren Mundstücks und der optionalen Erwachsenenmaske lässt sich die VORTEX flexibel an die Bedürfnisse aller Patienten anpassen.



VORTEX mit Mundstück



VORTEX mit Erwachsenenmaske und Einhand-Bedienhilfe



PARI GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
E-Mail: info@pari.de, Tel.: +49 (0)8151 279 0, www.pari.com

051D0177-B-2024-11



VORTEX® Inhalierhilfe

Vorschalten. Abatmen. Aufatmen.

KURZANLEITUNG



www.pari.com

So einfach geht's:
Aufbau & Inhalation mit ...
 ... Mundstück



Spray-Kappe entfernen



Spray kräftig schütteln



Spray hinten in die VORTEX stecken



VORTEX-Kappe entfernen



Mundstück zwischen die Zähne nehmen und mit Lippen umschließen



Spray auslösen, tief und langsam einatmen, Atem anhalten (wenn möglich), langsam ausatmen

Bei mehreren Sprühstößen pro Anwendung:
 Schritt 6 wiederholen

... Maske und Einhand-Bedienhilfe



Spray-Kappe entfernen, kräftig schütteln



Einhand-Bedienhilfe über die Kammer schieben



Spray in den Anschlussring stecken und die Einhand-Bedienhilfe einklicken



Kappe entfernen, Maske mit Verbindungsstück aufstecken



Maske dicht über Mund und Nase legen



Spray auslösen, tief und langsam ein- und ausatmen

Bei mehreren Sprühstößen pro Anwendung:
 Schritt 6 wiederholen

Reinigen

Desinfizieren



VORTEX auseinanderbauen



Reinigung in warmem Wasser mit Spülmittel. Mit klarem Wasser abwaschen.



Auskochen, **5 Minuten**



Trocknen lassen



Alternativ:
 In Spülmaschine einräumen, Programm mit **min. 50°C** wählen



Alternativ:
 Desinfektion im Babyflaschen Vaporisator wählen