

Praktyczny uchwyt do trzymania jedną ręką – rodzice mają tylko dwie ręce



Opatentowany uchwyt do trzymania jedną ręką umożliwia korzystanie z VORTEX jedną ręką i podawanie aerosolu. Podczas inhalacji dziecko można bezpiecznie trzymać – powodzenie terapii w przypadku inhalacji u dzieci.

Na filmie wideo w prosty sposób wyjaśniono korzystanie z VORTEX.



VORTEX® – idealny dla dzieci w każdym wieku



0-1½



VORTEX z maską dla niemowlaka oraz uchwytem do trzymania jedną ręką



1-4



VORTEX z maską dla dzieci



4+



VORTEX z ustnikiem

Maski VORTEX® dla niemowląt i dzieci – superwygodne i skuteczne

- **Przyjemność i wygoda noszenia** – wysoka akceptacja oraz bezstresowe stosowanie dla dziecka i rodziców
- **Skuteczna inhalacja** – miękka krawędź maski przylega szczelnie przy niewielkim nacisku
- **Prosta higiena** – nadaje się do wygotowywania, sterylizacji oraz mycia w zmywarkach


Nie zawiera BPA



PARI

PARI GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY
E-mail: info@pari.de, tel.: +49 (0)8151 279 0, www.pari.com

051D0238-A-2024-08

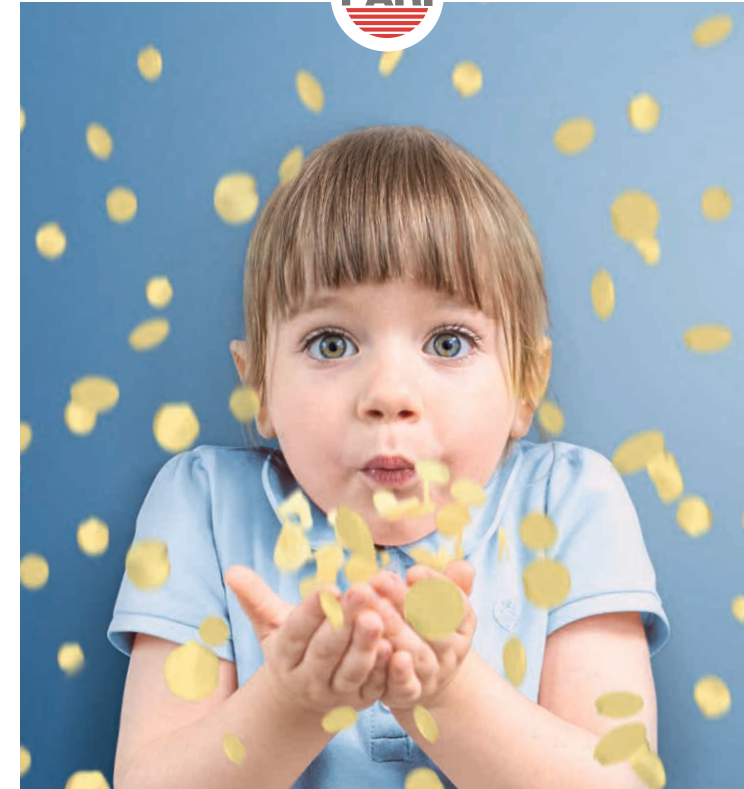

VORTEX®


Podłączanie. Wydychanie. Wdychanie.

KRÓTKIE WPROWADZENIE

www.pari.com



Prosta instrukcja: Złożenie i inhalacja z użyciem... ... ustnika

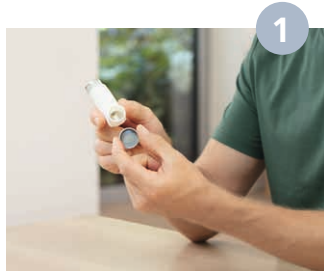

Zdjąć zatyczkę sprayu, mocno potrząsnąć.



Spray umieścić z tyłu w VORTEX.



Zdjąć zatyczkę VORTEX.



Ustnik uchwycić zębami i objąć ustami.



Zwolnić spray.



Oddychać powoli i głęboko.

W przypadku kilku podań na zastosowanie:

Powtórzyć krok 5 oraz 6.

0–18 miesięcy: 4–6 wdechów, **> 18 miesięcy:** 2–4 wdechy

... Maska dla niemowlęcia i uchwyt do trzymania w jednej ręce



Zdjąć zatyczkę sprayu, mocno potrząsnąć.



Uchwyt do trzymania jedną ręką przesunąć przez komorę.



Spray umieścić w pierścieniu podłączeniowym i wcisnąć uchwyt do trzymania jedną ręką.



Zdjąć zatyczkę i nałożyć maskę.



Maskę ułożyć szczelnie wokół ust i nosa.



Zwolnić spray, oddychać powoli i głęboko.

W przypadku kilku podań na zastosowanie:

Powtórzyć krok 6.

0–18 miesięcy: 4–6 wdechów, **> 18 miesięcy:** 2–4 wdechy

Czyszczenie

Dezynfekcja



Zdemontować VORTEX



Czyścić w ciepłej wodzie z środkiem do mycia, płukać w czystej wodzie.



Wygotowywanie **5 minut**



Pozostawić do wyschnięcia.



Alternatywnie:

Czyścić w zmywarce; wybrać program o temp. **min. 50°C.**



Alternatywnie:

Dezynfekcja w sterylizatorze parowym do butelek do karmienia niemowląt