

**Pratik tek eli kullanma  
yardımı** – çünkü ebeveynlerin  
sadece iki eli vardır



Patentli tek eli kullanma yardımı, VORTEX'i bir elle kullanma ve dozajlama aerosolünü tetikleme imkânı sunar. Böylece bebeklerdeki nefes almada terapinin başarılı olması için, çocuğunuzu nefes alma sırasında güvenli bir şekilde tutabilirsiniz.


**VORTEX'i kullanma videoda kolayca  
anlaşılacak şekilde açıklanmıştır**



**VORTEX®** – her yaşta  
çocuk için mükemmeldir



**Bebek maskeli  
VORTEX**  
ve tek eli  
kullanma yardımı

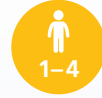

**Çocuk maskeli  
VORTEX**



**Ağızlıklı  
VORTEX**

**VORTEX® Bebek ve çocuk maskeleri –  
ekstra konforlu ve etkili**

- **Rahat kullanım konforu** – yüksek bir kabul oranı ve çocuk ve ebeveyn için stressiz bir kullanım için
- **Etkili nefes alma** – yumuşak maske kenarı az bir bastırma basıncıyla sıkıca kapama sağlar
- **Hijyen, çocuk oyuncaktır** – kaynatılabilir, sterilize edilebilir ve bulaşık makinesine girer

**BPA  
boş**



PARI GmbH, Moosstraße 3, 82319 Starnberg, GERMANY  
E-posta: info@pari.de, Tel.: +49 (0)8151 279 0, www.pari.com

051D0239-A-2024-08



**VORTEX®**


Çalıştırın. Nefes verin. Nefes alın.

**KISA TALİMAT**

www.pari.com



**Bu kadar kolaydır:**  
**Kurulum ve nefes alma için...**  
... ağızlık

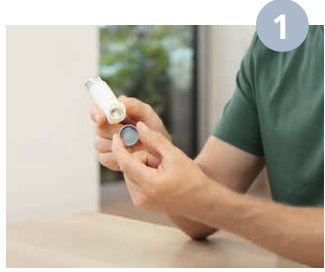

1  
Sprey kapağını çıkarın,  
iyice çalkalayın



2  
Spreyi arkadan VORTEX'e  
takın




3  
VORTEX kapağını çıkarın



4  
Ağızlığı dişlerinizin arasına  
sokun ve dudaklarınızla  
kavrayın



5  
Spreyi kullanın

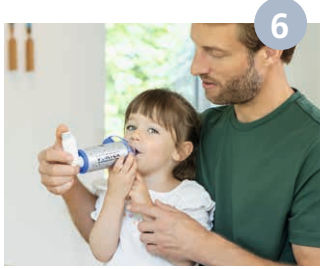

6  
Derin ve yavaş nefes  
alıp verin

**Uygulama başına birden fazla püskürtme itmesinde:**  
5. ve 6. adımı tekrarlayın

**0-18 aylık:** 4-6 nefes, **>18 aylık:** 2-4 nefes

... bebek maskesi ve tek elleri kullanma yardımı



1  
Sprey kapağını çıkarın,  
iyice çalkalayın



2  
Tek elleri kullanma yardımını  
bölmenin üzerine itin



3  
Spreyi bağlantı halkasına  
takın ve tek elleri kullanma  
yardımına tıklayın



4  
Kapağını çıkarın ve maskeyi  
takın



5  
Maskeyi sıkıca ağız ve burun  
üzerine geçirin



6  
Spreyi kullanın, derin ve  
yavaş nefes alıp verin

**Uygulama başına birden fazla püskürtme itmesinde:**  
6. adımı tekrarlayın

**0-18 aylık:** 4-6 nefes, **>18 aylık:** 2-4 nefes

**Temizleme**

**Dezenfeksiyon**



1  
VORTEX  
parçalarına ayırın



2  
Bulaşık deterjanlı ılık  
suda temizleyin,  
berrak suyla durulayın



2  
Kaynatın,  
**5 dakika**



3  
Kurumasını bekleyin



**Alternatif:**  
Bulaşık makinesine  
yerleştirin, **min. 50°C**  
kullanılan programı seçin



**Alternatif:**  
Biberon  
buharlaştırıcısındaki  
dezenfeksiyon