



NasoDirect®

Nasenspray mit CAPTOMUCIL®

Hypertone Lösung
Verflüssigt überschüssigen Schleim
Fördert das Abfließen von Nasensekret
Lindert Beschwerden bei gereizter
Nasenschleimhaut

1. Was ist NasoDirect und wann wird es angewendet?

NasoDirect Nasenspray mit CAPTOMUCIL® hilft bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen, die mit einer erhöhten Schleimbildung einhergehen, z. B. bei Erkältung, Schnupfen, der mit akuter oder chronischer Rhinosinusitis einhergehen kann, oder allergischer Rhinitis.

1.1 Wie wirkt NasoDirect?

Bei Muzin handelt es sich um ein Protein das natürlicherweise in menschlichem Schleim vorkommt. Eine Überproduktion kann jedoch zu einer Verfestigung des Schleims und damit zur Verstopfung der Nase führen. Wenn **CAPTOMUCIL®** mit bestimmten Mengen von Muzin in Kontakt gebracht wird, ist es in der Lage, die Viskosität des überschüssigen Schleims zu verringern und einen schnellen und effektiven Abfluss des Schleims zu fördern. Spezifische, vom Hersteller durchgeführte Studien haben gezeigt, dass die schleimlösende Wirkung von **CAPTOMUCIL®** innerhalb von 30 Sekunden erfolgt*. Die hypertone Lösung verstärkt die abschwellende Wirkung von **CAPTOMUCIL®**, indem sie die Fließeigenschaften des überschüssigen Schleims weiter erhöht.

1.2 Zusammensetzung

CAPTOMUCIL®, Wasser, Natriumsaccharin, Natriumchlorid, Minzaroma, Dexpanthenol, Natriummethylparahydroxybenzoat.

2. Inhalt

Flasche, 20 ml

3. Wie wird NasoDirect verwendet?

Erwachsene und Kinder > 12 Jahre: 1–2 Sprühstöße pro Nasenloch, 3–4-mal täglich

Kinder von 6 bis 12 Jahren: 1–2 Sprühstöße pro Nasenloch, bis zu 2-mal täglich.

Bei Kindern unter 12 Jahren das Produkt nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker verwenden.

4. Welche Nebenwirkungen können bei NasoDirect auftreten?

Bei den zur Erzielung eines therapeutischen Effekts erforderlichen Dosen, sind, außer in Fällen individueller Unverträglichkeiten, keine unerwünschten Nebenwirkungen bekannt. Falls die Symptome nach einer kurzen Behandlungszeit (5–7 Tage) weiter bestehen sollten, einen Arzt konsultieren.

5. Gibt es Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten?

Für die Komponenten des **NasoDirect Nasenspray** sind keine Wechselwirkungen mit Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten bekannt. Im Allgemeinen sollten Sie **NasoDirect** nicht innerhalb von 1 Stunde vor oder nach dem Gebrauch anderer nasal verabreichten Medikamenten einnehmen. Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker vor der Einnahme des Produkts, wenn Sie gleichzeitig Medikamente einnehmen müssen

6. Wie wird NasoDirect aufbewahrt?

Bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C an einem trockenen Ort, vor direktem Licht

und Feuchtigkeit geschützt, lagern. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

7. Warnhinweise und Gegenanzeigen

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Kindern unter 6 Jahren.

Während der Schwangerschaft und in der Stillzeit und bei Kindern unter 12 Jahren, darf das Produkt nur nach Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker verwendet werden.

Die empfohlenen Tagesdosen nicht überschreiten.

Das Produkt nicht länger als 30 aufeinanderfolgende Tage anwenden, falls die Symptome weiter bestehen sollten, einen Arzt konsultieren. Das Produkt kann bei Rhinosinusitis in Verbindung mit Nasenpolyphen eine verminderte Wirksamkeit haben.

Nicht anwenden bei Unverträglichkeit des Produkts. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit oder bekannten Allergien gegen die verwendeten Inhaltsstoffe.

Im Falle von unerwünschten Nebenwirkungen die Anwendung des Produkts unterbrechen und einen Arzt konsultieren.

Bei empfindlichen Personen ist ein leichtes und vorübergehendes Kribbeln/Brennen nach der Anwendung als normale und unbedenkliche Wirkung des Produkts zu betrachten. Spülen Sie den Sprühkopf nach dem Gebrauch mit heißem Wasser ab und trocknen Sie ihn mit einem Papiertuch.

8. Haltbarkeitsdauer

Nicht nach Ablauf des auf der Verpackung

angegebenen Verfallsdatums anwenden! Das Verfallsdatum bezieht sich auf das Produkt in intakter Verpackung und bei korrekter Lagerung. Das Produkt nicht länger als drei Monate nach dem Öffnen verwenden.

9. Entsorgung

Abgelaufene Medizinprodukte müssen gemäß den in Deutschland geltenden Entsorgungsvorschriften gehandhabt werden. Das Produkt oder seine Verpackung nicht in der Umwelt entsorgen.

* An der Universität Münster durchgeführte Labor-Studie

Datum letzte Überarbeitung:

November 2020

www.siiit-pms.com/nasodirect
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Nehmen Sie sich bitte 5 Minuten Zeit für die Umfrage unter folgendem Link oder scannen Sie den QR-Code. So können wir Ihre Zufriedenheit mit dem Produkt beurteilen.



Hersteller



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
ITALY

Händler

PARI GmbH
Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstraße 3
82319 Starnberg, GERMANY